


Dräger Covid-19 Home Test In-vitro-Diagnostikum

Der Dräger Covid-19 Home Test ist ein Test Kit bestehend aus einem immunchemischen Schnelltest auf Teststreifenbasis inklusive eines Probennehmers für die Beprobung der vorderen Nasenhöhle. Der Dräger Covid-19 Home Test erfasst als repräsentativen Virusbestandteil das Nucleocapsidprotein (Antigen) des humanen SARS-CoV-2 qualitativ aus dem Nasenabstrich von Personen bei Verdacht einer SARS-CoV-2 Infektion.

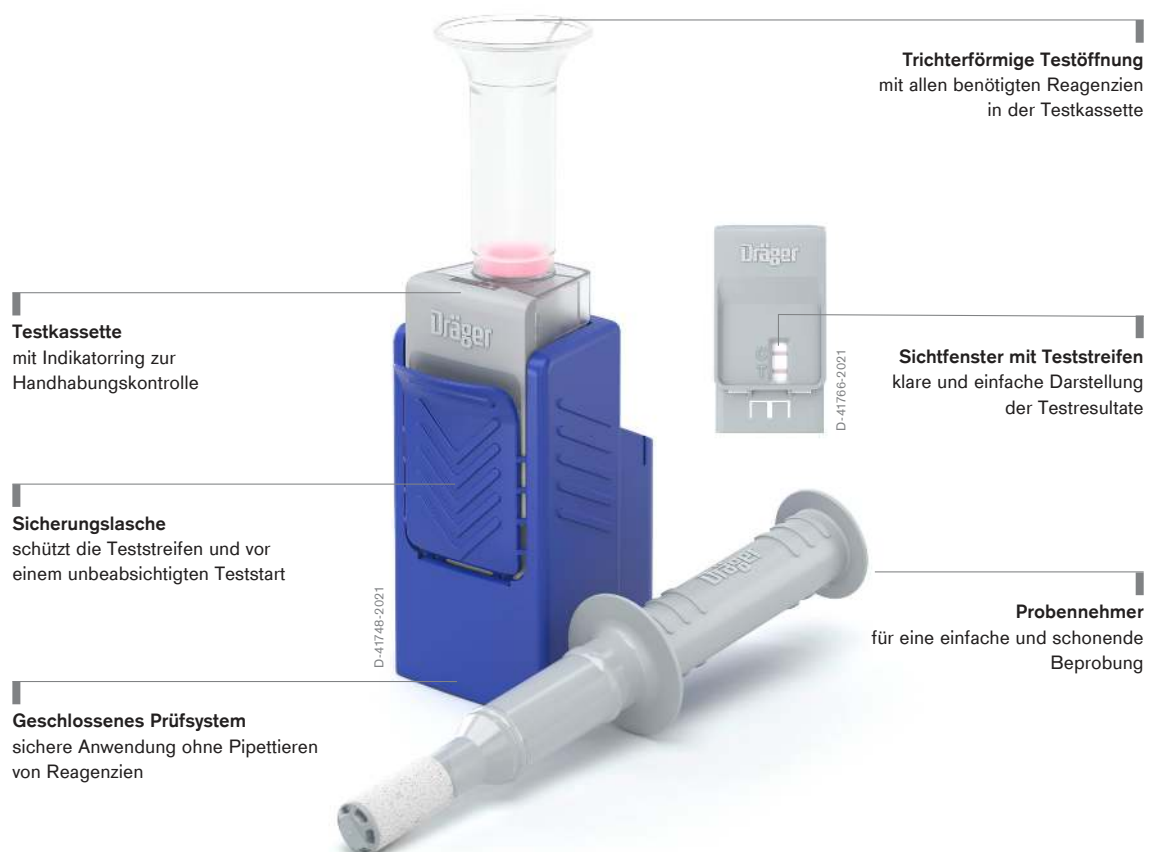

Produktvorteile

Sicheres Test Kit ohne Einzelteile

Der Dräger Covid-19 Home Test wird als geschlossenes System ohne Einzelteile geliefert. Er setzt sich aus nur zwei Komponenten zusammen: einem Probennehmer für die Beprobung und einer Testkassette für die Probenanalyse. Die Testkassette enthält bereits alle zur Analyse und damit zum Nachweis des Virus benötigten Reagenzien. Dadurch ist kein Pipettieren von Reagenzien notwendig und die Durchführung ist besonders hygienisch. So wird ein möglicher Kontakt mit der Probe und den Reagenzien verhindert.

Identifizierung potenziell infektiöser Personen

Zum Nachweis des SARS-CoV-2 erfasst der Dräger Covid-19 Home Test die für das Virus typischen Proteine. Zusätzlich zum Wildtyp detektiert er nachweislich die Variante B.1.1.7 (Alpha) und hilft dabei, schnell und einfach potenziell infektiöse Personen mit einer Sensitivität von 96,8 %¹ zu identifizieren. Die frühzeitige Erkennung kann dabei helfen, Infektionsketten zu durchbrechen und die Ausbreitung des Virus aufzuhalten.

¹ Die Konzentration von 10^6 RNA-Kopien/mL stellt einen Orientierungswert für Infektiosität dar. In der Charité-Studie lagen alle Proben oberhalb von CT 26 darunter.

Sanfte und schonende Probennahme

Zur Erfassung des Nucleocapsidproteins (Antigen) wird lediglich eine Probe aus dem vorderen Nasenbereich benötigt. Die Beschaffenheit des Probennehmers bewirkt, dass dieser nicht zu tief in die Nase eingeführt werden kann und reduziert die Gefahr einer falschen Beprobung. Das Ende des Probennehmers wird in den vorderen Nasenbereich eingeführt und mit einer kreisenden Bewegung an den Naseninnenwänden abgestrichen. Diese Art der Beprobung sorgt dafür, dass der Testvorgang sanft und schonend ist.

Einfach. Sicher. Schnell.

Der Dräger Covid-19 Home Test bietet eine sichere Testdurchführung und liefert Ergebnisse in wenigen Minuten. Durch die einfache Handhabung können Testungen an verschiedenen Personen schnell nacheinander durchgeführt werden. Der Test erfolgt in nur wenigen Schritten:

1. Probe sammeln
2. Probennehmer in die Testkassette stecken
3. Test Kit schütteln und Analyse starten
4. Resultate im Sichtfenster ablesen

Die Kontrolllinie und der sich entfärbende Indikatorring machen die Handhabung und das Ablesen der Testergebnisse einfach und unkompliziert.

Produktvorteile

Wissenschaftliche Studie der Berliner Charité

Die Sensitivität und Spezifität des Dräger Covid-19 Home Tests wurden in einer prospektiven Studie mit 378 Probanden in einem Zeitraum von Februar bis März 2021 an der Charité in Berlin (Deutschland) ermittelt.

Verwandte Produkte

ST-9485-2007



Dräger X-plore® 1700

Cooler Sache: Die Dräger X-plore® 1700 macht das Atmen leicht und angenehm. Das CoolSAFE Filtermaterial sorgt für niedrige Atemwiderstände bei gleichzeitig hoher Filterleistung. Und das CoolMAX Ventil führt Feuchtigkeit und Wärme wirksam nach außen ab. Das Atmen fällt damit besonders leicht und es bleibt angenehm kühl unter der Maske.

D-16779-2018



Dräger X-plore® 1900

Die Dräger X-plore® 1900 ist die leistungsstarke partikelfiltrierende Einweg-Halbmaske zum Schutz gegen Feinstäube und Partikel. Die Premium-Staubmaske ist in zwei Größen erhältlich und verbindet einfache Handhabung, herausragenden Tragekomfort und optimalen Sitz. Für ein Höchstmaß an Sicherheit – auch für Brillenträger.

Verwandte Produkte



Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900

Leicht und komfortabel zu tragen: Die flüssigkeitsdichten Spritzschutzanzüge Dräger SPC 4X00 bieten zuverlässigen Schutz gegen feinste Stäube und Pulver, viele konzentrierte, anorganische Säuren und Laugen, sind aber auch beständig gegen ein großes Spektrum organischer flüssiger Chemikalien. Sie sind CE-zertifiziert und als Typ 3, 4, 5, 6 klassifiziert.



Dräger X-pect® 8200 / 8300 Schutzbrillen

Optimale Passform und hoher Komfort: Dräger X-pect® 8200 und 8300 Schutzbrillen. Jedes Modell hat spezielle Eigenschaften, wie flache und flexible Bügel, um sich individuell an die Kopfform anzupassen. Die Dräger Schutzbrillen bieten eine lange Lebensdauer dank der hochwertigen Materialien und sind optimal mit anderer persönlicher Schutzausrüstung, wie z.B. Halbmasken, kombinierbar.

Technische Daten

Test Kit zum qualitativen Nachweis des SARS-CoV-2 Antigens (Ag) aus Nasenabstrich

Test Typ	Qualitativ
Probenmaterial	Abstrich im vorderen Nasenbereich
Spezifität	99,7 %
Sensitivität	96,8 % ¹ bezogen auf den Orientierungswert der Infektiosität (www.rki.de/covid-19-diagnostik)
Kreuzreaktivitäten und Interferenzen	Untersuchungen mit respiratorischen Keimen und Viren sowie potenziell interferierenden Substanzen, die im Mund-Rachenraum und in der Nase vorkommen können, führten zu negativen Testresultaten.
Dauer einer Messung	Auswertung < 20 Minuten
Abmessungen (B x H x T)	32 x 111 x 57 mm
Gewicht	< 30 g
Arbeitsbereich	Betrieb: 15 °C bis 30 °C
Lagerung und Transport	4 °C bis 25 °C

¹ Die Konzentration von 10⁶ RNA-Kopien/mL stellt einen Orientierungswert für Infektiosität dar. In der Charité-Studie lagen alle Proben oberhalb von CT 26 darunter.

Bestellinformationen

Dräger Covid-19 Home Test zum Nachweis des humanen SARS-CoV-2 aus Nasenabstrichen	Beschreibung	Bestell-Nr.
Dräger Covid-19 Home Test	1 Stück Test in Handelsverpackung inklusive Gebrauchsanweisung	37 17 198

Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0800 882 883 0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

